

鼻骨プロテクタ 取扱説明書

この度は、弊社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになられた後は、保証書とともに大切に保管し、必要に応じくりかえしお読みください。



※写真は鼻骨骨折に対しての基本作製品です。骨折部位やキズ等、
オーダーメイド対応により仕様が異なる場合があります。

鼻骨プロテクタとは……………

治療用のものではなく鼻骨骨折の整復後、治療部位保護のために使用していただくものです。
また、完全に保護できるものではなく、衝撃の大きさや方向によっては再骨折する場合もあります。

もくじ

1. ご使用上の注意 ……………	P.2
2. 各部の名称と仕様 ……………	P.3
3. ご使用前の点検・準備 ……………	P.3
4. 装着方法 ……………	P.4
5. 日常のお手入れと保守点検 ……………	P.6
6. 保管方法 ……………	P.6
7. 修理について ……………	P.6
8. 保証書 ……………	P.8

1. ご使用上の注意



注意

誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は、治療用のものではなく鼻骨骨折の整復後、治療部位保護のために使用していただくものです。また、完全に保護できるものではなく、衝撃の大きさや方向によっては再骨折する場合もあります。
- 頬骨と眉上部にて支持しますので、その部分にキズ等がある場合は使用できません。
- 当社係員による使用方法の説明を受けるまでは本製品をご使用にならないでください。
- ベルト類は確実に締め付けてください。締め付けが不十分な場合、使用中にはがれてくる恐れがあります。
- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず当社へ修理交換をご相談ください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は使用者の顔の骨格や形状に合せた完全オーダーメイド品です。本製品を他の方に転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。


* 本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。

* 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。

不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。

2. 各部の名称と仕様

本装具は次のような部品で構成されています。

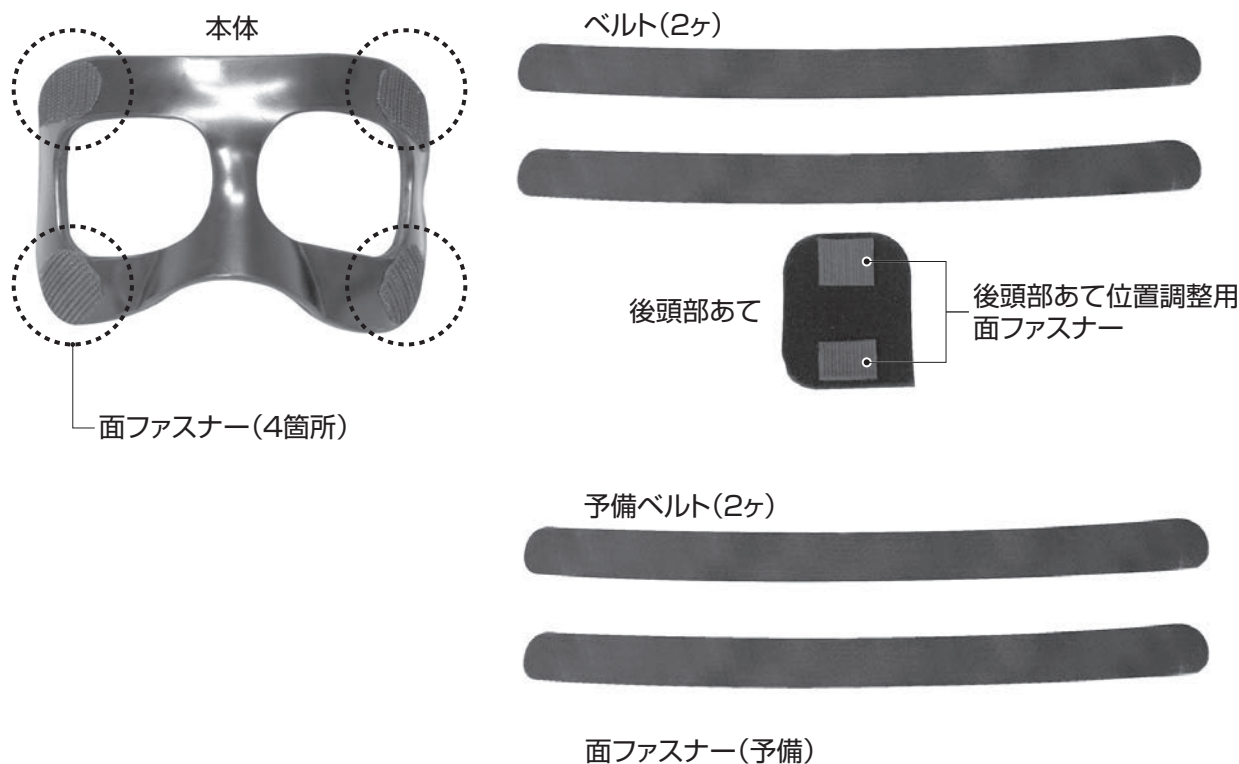

●材質

部品名	材質
本体	コ・ポリプロピレン
内張り	エチレンスポンジ
ベルト	ナイロン
後頭部あて	表面、裏面：ナイロン 中材料：圧縮ウレタン

- 重量：約60g
- 厚み：約5.5mm
- 色：黒（つや消し）

3. ご使用前の点検・準備

以下の項目を点検してください。

- ・本体やベルトなどの各部に亀裂や破損、ほつれ等はないか。
- ・面ファスナーの接着不良はないか。
- ・本体内側のクッション材がはがれていないか。
- ・その他の異常を発見した場合も使用を直ちに中止し、弊社に修理交換をご相談ください。
- ・異常状態のまま使用しないでください。


4. 装着方法

⚠️ 注意 当社係員による使用方法の説明を受けるまでは本製品をご使用にならないでください。

- ①ベルトの中心に後頭部あてを取り付け、後頭部に当てます。




- ②本体を顔面に当てます。

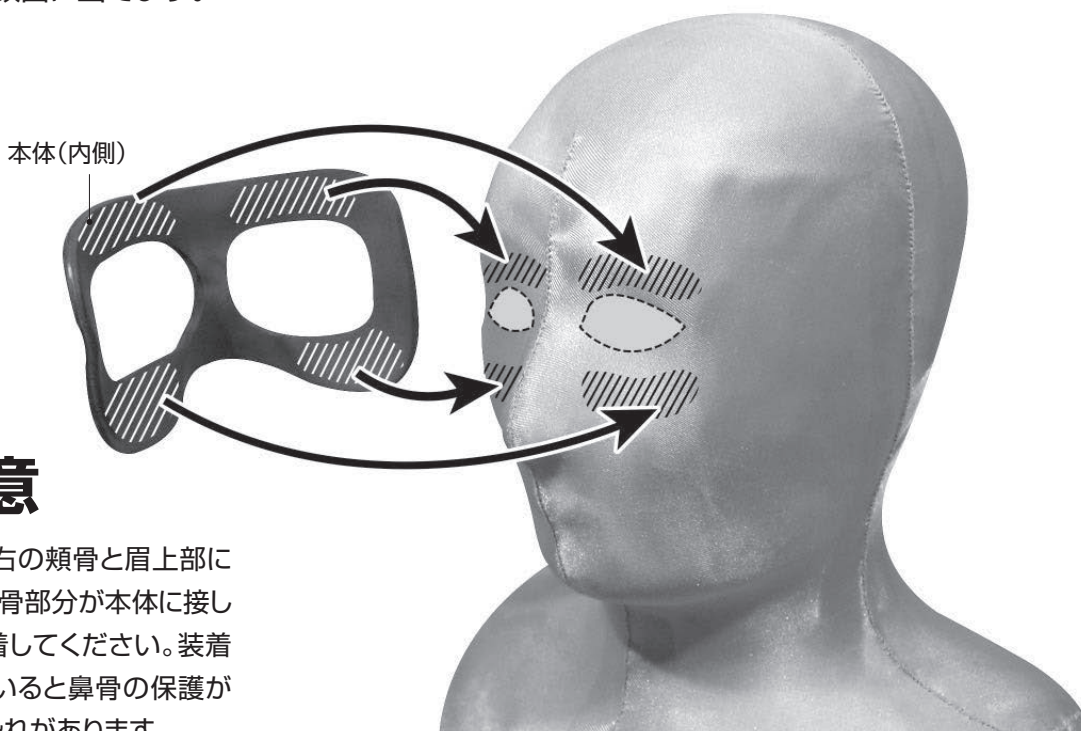

⚠️ 注意

本体内面を左右の頬骨と眉上部に確実に当て、鼻骨部分が本体に接しないように装着してください。装着位置がずれていると鼻骨の保護ができなくなる恐れがあります。

- ③横から見た場合です。
本体と鼻骨の間にすきまが
できていることを確認して
ください。

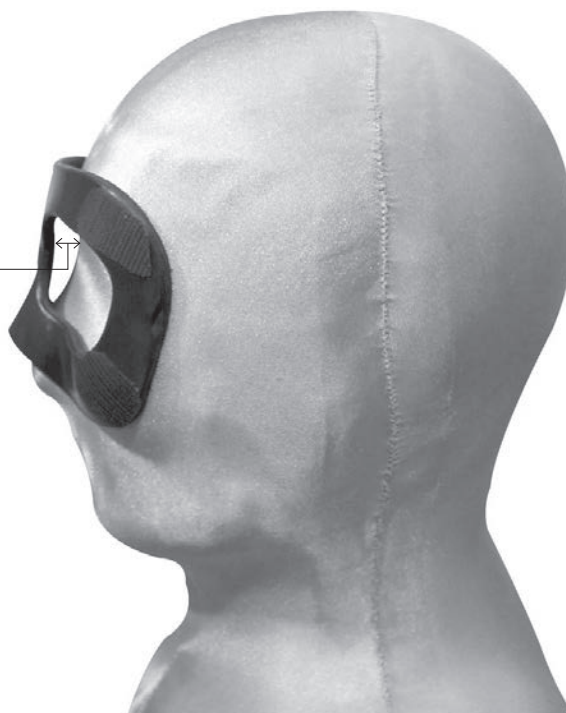


⚠️ 注意

本体内面を左右の頬骨と眉上部に
確実に当て、鼻骨部分が本体に接し
ないように装着してください。装着
位置がずれていると鼻骨の保護が
できなくなる恐れがあります。

- ④左右のベルトの先端を
面ファスナーに固定します。

*後頭部あてが後頭部中心に
位置しているかを手で探り
つつ確認し、ベルトの先端を
面ファスナーに固定します。
はみ出した先端はカットします。

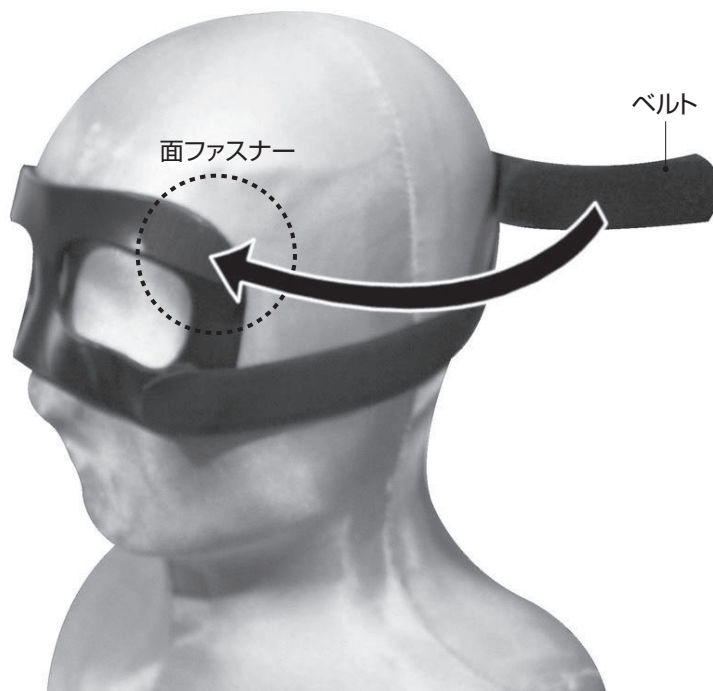

面ファスナーの交換方法

(面ファスナーがはがれた場合は付属の部品と交換してください)

- ①本体の汚れを取ります。
- ②面ファスナーの剥離紙をはがします。
- ③粘着部分をドライヤーなどで加熱します。
- ④本体に貼り付けます。


⚠️ 注意

- ヤケドなどに注意してください。
- 面ファスナーのフック部分を溶かさ
ないように注意してください。


5. 日常のお手入れと保守点検

- 洗濯は中性洗剤を使用して手洗いし、日陰干ししてください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し弊社に修理交換をご相談ください。
- 保守点検が必要な部分
 - ・本体やベルトなどの各部に亀裂や破損、ほつれ等はないか。
 - ・面ファスナーの接着不良はないか。
 - ・本体内側のクッション材がはがれていないか。
 - ・その他の異常を発見した場合も使用を直ちに中止し、弊社に修理交換をご相談ください。

6. 保管方法

-  **注意**
- 常温の範囲で保管してください。
常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
 - 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管してください。
 - 製品の上に重いものをのせないでください。
製品が変形または破損する恐れがあります。

7. 修理について

-  **注意**
- 本製品装着者による修理・改造等は絶対に行わないでください。
本製品の修理・改造等が必要と思われる場合は当社にご相談ください。
(面ファスナーの交換を除く。)