


頭部保護帽

**KAWAMURA**  
Think Possibility

# ファインホールドⅡ 取扱説明書

装着者用

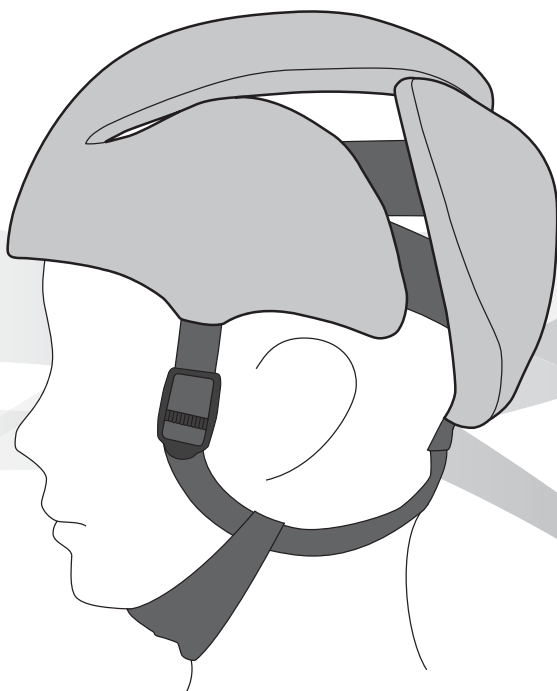

この度は「ファインホールドⅡ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本書は「ファインホールドⅡ」を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

## ファインホールドⅡ（頭部保護帽）とは

てんかん発作などにより、頻繁に転倒する方や、転倒により頭部を強打するおそれのある方の頭部を転倒の衝撃から保護するものです。

すべての衝撃から頭部を保護できるものではありませんので、場合によっては頭部への衝撃を吸収できないおそれがあります。

# 1. 安全にご使用いただくために



## 警告

誤った使い方をしたときに、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 必ず医師の指示に従って使用してください。
- 本製品は頭部保護帽です。ヘルメットのように強い衝撃に対して安全を保証できません。
- 本製品を自転車用ヘルメットとして使用しないでください。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方への転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 使用にあたっては、感染症等の予防のためスプレー式のアルコール消毒剤の使用をお勧めいたします。
- 装着部に発赤やかぶれ、痛みが生じた場合、直ちに医師の指導を受けてください。
- 不適合が生じた場合や変形、磨耗、異音が生じた場合など、本製品の異常は、身体を傷つけることがありますので、異常を発見した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- 製品の機能操作は確実に行ってください。（特にベルト部分の固定、解除の際には確実に操作してください。）
- 装着の際は、ベルト、紐等により適切な締め付けを行い、正しい位置を保持してください。



## 注意

誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 装着や使用の際、継手等の可動部分で体の一部や衣服等を挟んだりして傷つける場合がありますので取り扱いには注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

お願い

### 面ファスナーを

（マジックテープ、クイックロン、等）

しっかり押さえてご使用ください。

○面ファスナーはしっかり押さえる事で接着されています。

△不十分な場合、接着力が得られず危険です。

○ご使用の際は、しっかり押さえて（圧力をかけて）下さい。



KAWAMURA

### コルセット・補装具 装用時の カイロ（貼るカイロ等温熱剤）の 取扱いについての注意点



カイロ等温熱剤は、直接コルセット・補装具に貼らないようお願いします。




金属部分（筋金部分）やプラスチック部分と身体との密着度が高い場所には、特に貼らないようお願いします。



カイロ等どうしてもご使用される場合は、上記の事を守り、安全には十分注意をしてご使用ください。

## 2. 構成部品と各部の名称

本製品は下記の部品で基本構成されています。

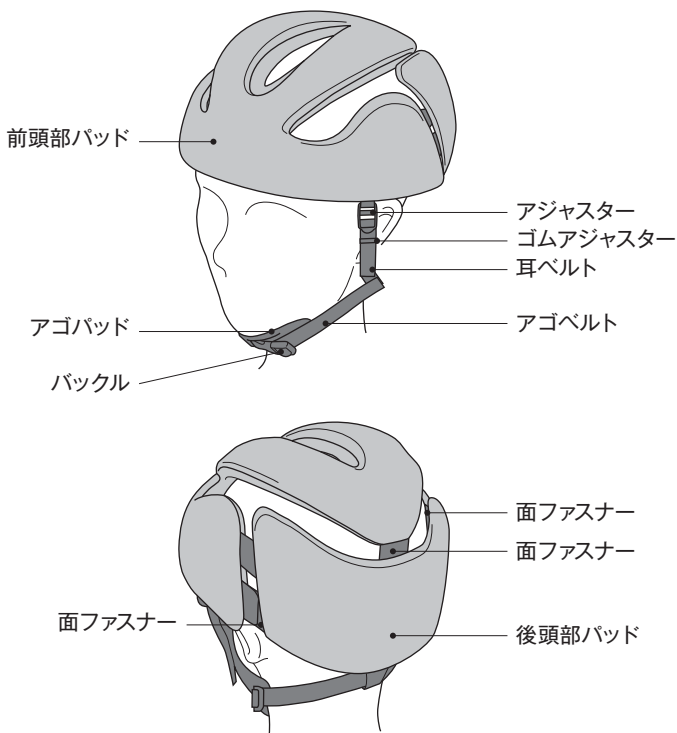

## 3. 仕様

サイズ S : 47 ~ 52 cm / M : 50 ~ 55 cm / L : 55 ~ 60 cm

材質

本体スポンジ	ポリエチレン系発泡体	アジャスター、バックル	ポリアセタノール樹脂
本体カバー	ポリエステル	アゴパッド	ポリエステル ポリウレタン発泡体
アゴベルト	ポリプロピレン	面ファスナー	ナイロン


## 4. 装着方法




### 警告

本製品はアゴベルトで首を締めつけてしまう恐れがあります。装着の際は必ず「5. 各部の調整方法」を十分理解してから装着してください。


- ①前頭部パッドが前、後頭部パッドが後になるようにかぶってください。

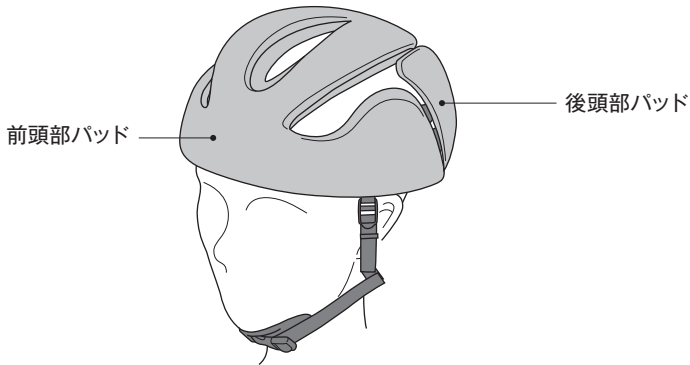


- ②アゴベルトのバックルをとめてください。

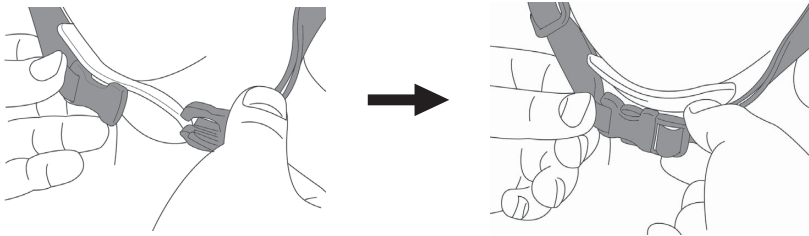

装着完了図

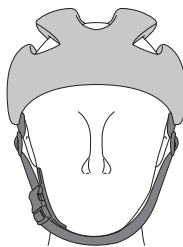

正面




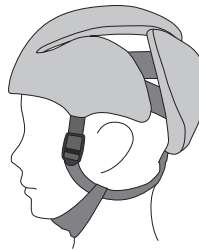


側面

## 5. 各部の調整方法

### 5-1. アゴベルト、耳ベルトについて

ベルトを長くするとき（アゴベルト、耳ベルト共通）

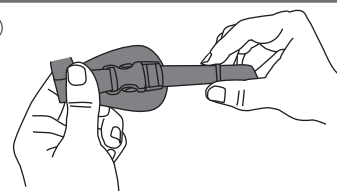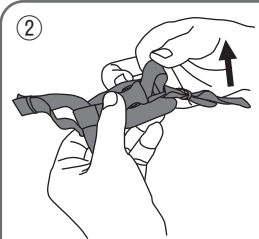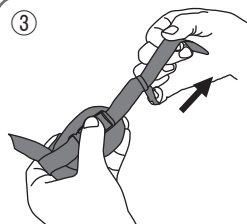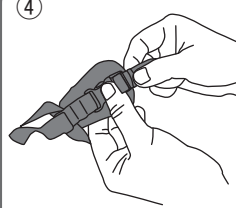
<p>①</p>  <p>ベルト（外側）を押し上げて、ゴムアジャスター部にたわみができるようにしてください。</p>	<p>②</p>  <p>ゴムアジャスター部にできたベルトのたわみを矢印の方向に引き出してください。</p>
<p>③</p>  <p>ベルト（内側）を矢印の方向に引っ張って引き出し、たわみをなくしてください。</p>	<p>④</p>  <p>ゴムアジャスターを一番上まであげてください。 ※ずれ防止のため</p>

ベルトを短くするときは、②の手順でベルトの引き出す方向を逆にしてください。



**警告**


- アジャスターは、一番上まで上げてください。ベルトがゆるみやすくなりケガにつながるおそれがあります。
- アゴベルトを長くしすぎないようにしてください。使用中に頭部から外れるおそれがあります。

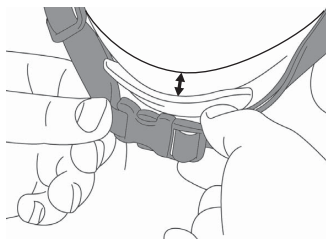

ゴムアジャスターを一番上まであげてください。  
アゴベルトは、あごとアゴベルトの間に指一本入る長さに調整してください。

## 5-2. 周径調整について


### ●深さの調整をするとき

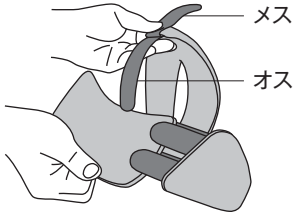

面ファスナーのオスを後頭部パッドからはずしてください。



メスをオスと同じ長さにカットする。

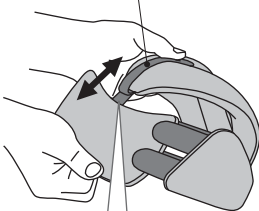


最大3.0cm



ご使用者の頭の深さに合わせて面ファスナー（オス）を後頭部パッドの内側に取り付けてください。


### ●周径の調整をするとき

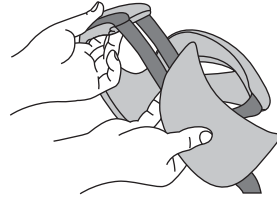

面ファスナーのオスを後頭部パッドからはずしてください。



メスをオスと同じ長さにカットする。

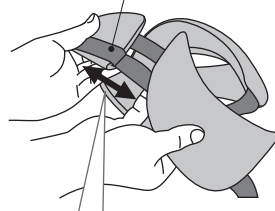

最大3.0cm



ご使用者の頭の周径に合わせて面ファスナー（オス）を後頭部パッドの内側に取り付けてください。



**警告**

- 面ファスナー（オス）を3.0cm以上の長さに絶対しないでください。すきまが大きくなり転倒時、ケガにつながるおそれがあります。
- カットした面ファスナー（メス）を保管し、更に伸ばすときに使用してください。面ファスナー（メス）を貼り付けずに使用しますと、面ファスナー（オス）で皮膚にキズをつけるおそれがあります。

## 6. 日常の保守点検

使用前・使用後は以下の点検を行ってください。

- 面ファスナーに破損や裂け等はないか？
- 面ファスナーに接着不良はないか？
- バックル・アジャスターに破損はないか？
- 前後頭部パッドに破損や裂け等はないか？

## 7. お手入れ方法

汗をかいたり、製品が濡れたときは、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。面ファスナーの粘着力が低下している場合は、安全のため交換が必要となりますので弊社までご連絡ください。なお、毛玉等が付着した場合は、つまようじなどを面ファスナーの表面に滑らせて取り除いてください。

- 洗濯は中性洗剤で水にて押し洗いし、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。
- 本製品は色落ちや色移りする可能性がありますので単体で洗濯してください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- アイロン、乾燥機は使用しないでください。
- ドライクリーニングは行わないでください。
- 本製品は分解せず、装着時の状態で洗濯してください。

## 8. 廃棄方法

各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

## 9. 保証とアフターサービス

### 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。詳しくは弊社係員へご相談ください。

## 修理ご相談窓口

製品の修理のご相談は、最寄りのお客さま相談窓口までお電話ください。(巻末記載)

お客さま窓口

 **川村義肢株式会社**

www.kawamura-gishi.co.jp 

**大東本社** TEL.072(875)8020 FAX.072(875)8041  
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

**兵庫営業所** TEL.072(780)1645 FAX.072(780)1646  
〒664-0842 兵庫県伊丹市森本2-268-2

**大阪南営業所** TEL.072(260)0133 FAX.072(260)0134  
〒593-8325 大阪府堺市西区鳳南町4-434

**和歌山営業所** TEL.073(432)0685 FAX.073(432)0686  
〒640-8319 和歌山市手平1-5-25

**京滋営業所** TEL.075(604)1551 FAX.075(604)1552  
〒612-8248 京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町143

**工房てんま** TEL.06(6352)1012 FAX.06(6352)1018  
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-18-18

**東京本社** TEL.03(5635)1611 FAX.03(5635)1612  
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

**所 沢** TEL.04(2922)8188 FAX.04(2922)8177  
**サービスセンター** 〒359-1113 埼玉県所沢市喜多町16-7 第一武井ビル1F

**山梨営業所** TEL.055(262)9630 FAX.055(262)0787  
〒406-0024 山梨県笛吹市石和町川中島188