

スーパインボード 取扱説明書

医師・理学療法士・使用者向け

この度は、弊社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになられた後は、保証書とともに大切に保管し、必要に応じくりかえしお読みください。



1. 安全にご使用いただくために



警告

誤った使い方をしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 医師・理学療法士の指導のもと調整を行ってください。
- 本体を移動させたり、調整（傾き角度、高さ、幅等）したりする場合は、お子さまが降りている状態で行ってください。
- 本製品をご使用になる場合は、必ず介助者同伴のもと、ご使用ください。
- 介助者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないでください。
- 使用中はキャスターのロックが確実にきいていることをたえず確認しながら使用してください。キャスターロックがきいていない場合、介助者が制御できなくなる恐れがあります。
- 本製品は、室内の使用を目的にしていますので、室外での使用はできません。
- 使用時に身体を乗り出す等しないでください。転倒する恐れがあります。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 踏台や脚立のかわりに使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方へ転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。



注意


誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物理的損害の発生が想定される内容を示します。

- 各部の調整等で操作する場合は、指などを挟まないように注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

- ・ 本書中の図や写真は一部を省略または抽象化した表現になっているものがあります。
- ・ 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場所があります。不明な事柄については弊社までお問い合わせください。

2. 構成部品と各部の名称

本製品は、下記の部品で基本構成されています。

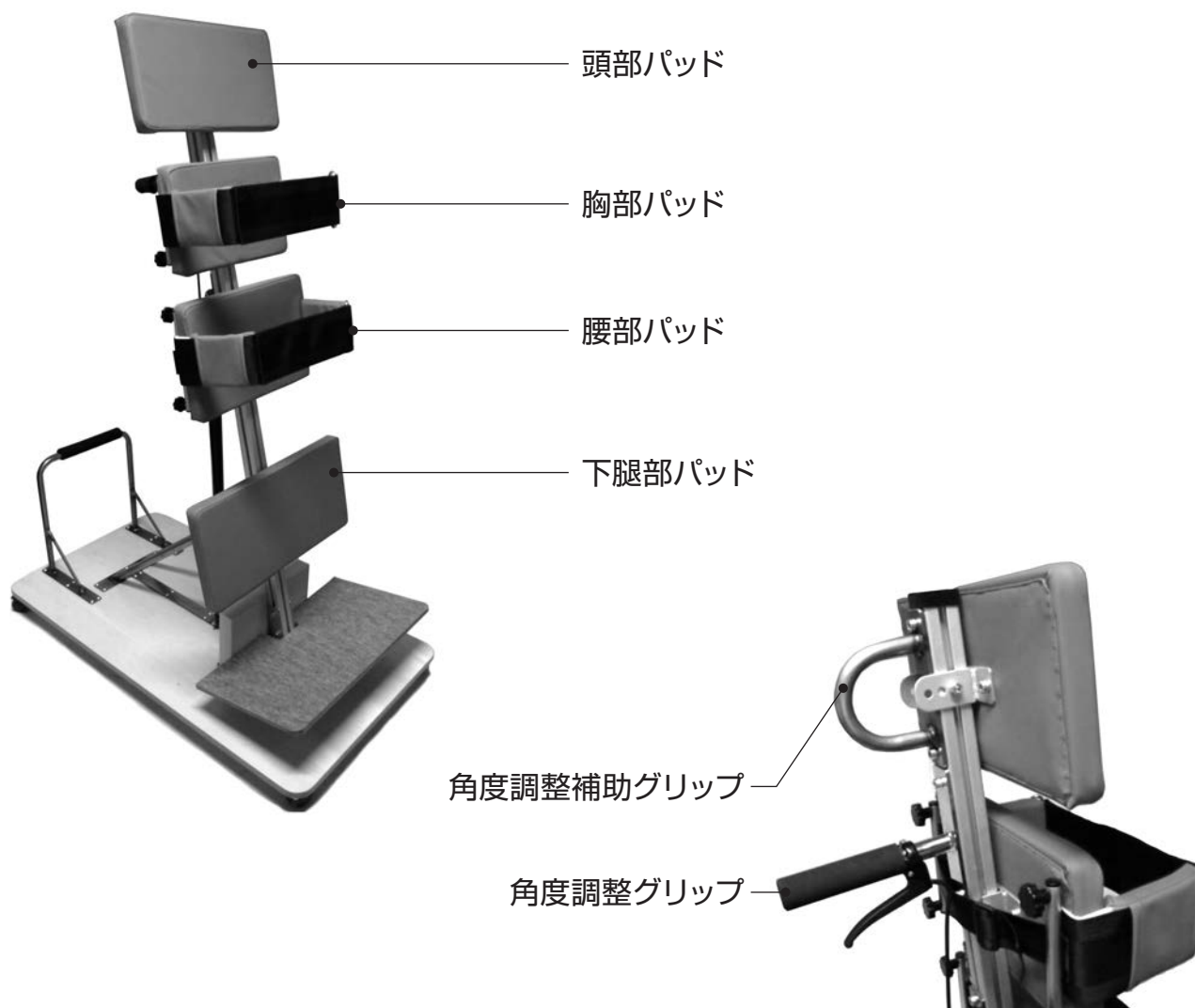

3. 仕様

本製品の仕様は下記の通りです。

材質	ポール=アルミ ベース=合板・クリアー塗装 頭部パッド・胸部パッド・腰部パッド・下腿部パッド=合板・ウレタンフォーム・生地 (ナイロン) 安全バー=鉄・メッキ
キャスター	φ50固定機構キャスター (4輪)

●使用者最大体重: 50kg

4. ご使用前の点検・準備

ご使用前にまず下記の点検を行ってください。

- (1) キャスターのガタツキはないか。
- (2) 各部品がゆるみやガタツキがなく取付けられているか。
- (3) 各ベルト類に損傷や裂け等はないか。
- (4) 縫製部分のほつれはないか。
- (5) ベルトの接着不良はないか。
- (6) 各部にひび割れや欠け、変形等はないか。
- (8) その他の異常はないか。

万一破損や異常を発生した場合はそのまま使用せず、必ず弊社にご連絡ください。

5. 各部の操作、調整方法



警告

- 医師・理学療法士の指導のもと調整を行ってください。
- 本体を移動させたり、調整（傾き角度、高さ、幅等）したりする場合は、お子さまが降りている状態で行ってください。



注意

- 各部の調整等で操作する場合は、指などを挟まないように注意してください。

5.1 キャスターのロック方法

- (1) キャスター上部のストッパー先端を、押し込むと、固定します。(図1)

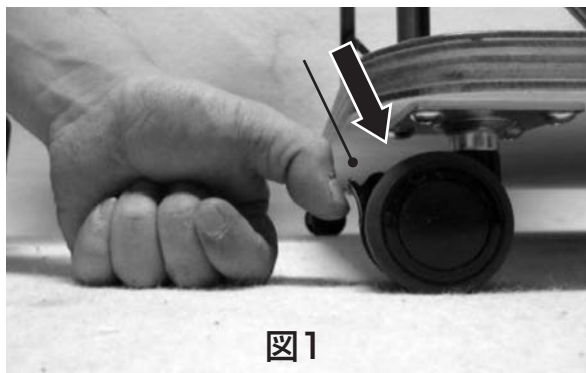


図1

- (2) キャスター上部のストッパーを、引き上げると、解除できます。(図2)

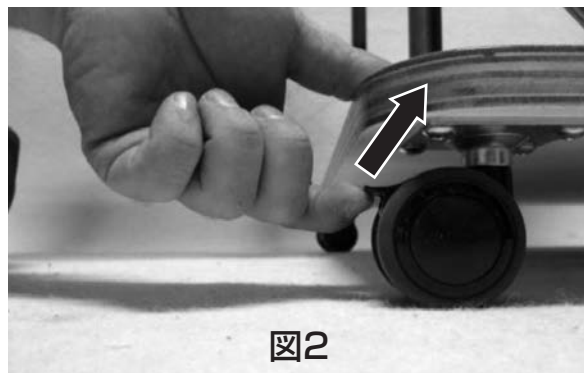


図2


- ※足で操作した場合、ストッパーが破損する恐れがありますので、手で操作を行ってください。
- ※キャスターは、車輪部分をやや浮かすようにしてロックする構造です、本体を押えながら操作すると、固定しにくくなります。その場合は本体から手を離して操作してください。

5.2 ポールの角度調整

(1) 片方の手で角度調整補助グリップを持ち、角度調整グリップを握ります。(図3)


※角度調整は補助グリップを支えながら行ってください。

補助グリップを持たずに片手だけで角度調整を行うと急に起立角度が変わる恐れがあります。

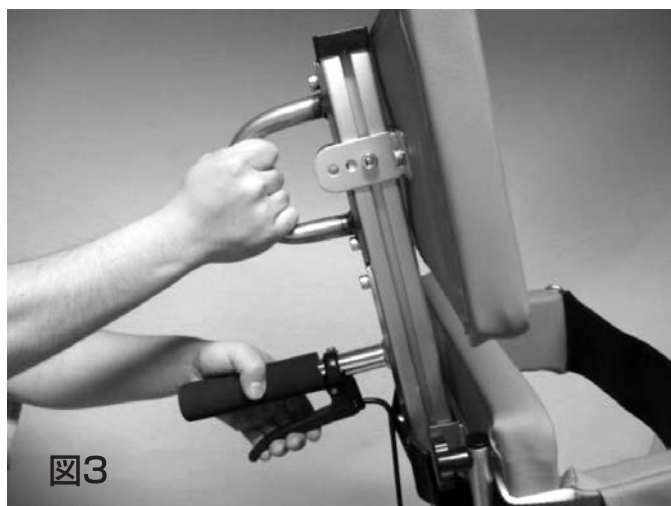


(2) 任意の角度に調整します。

(3) 角度調整グリップから手を離し、角度調整補助グリップを支えていた手を離します。

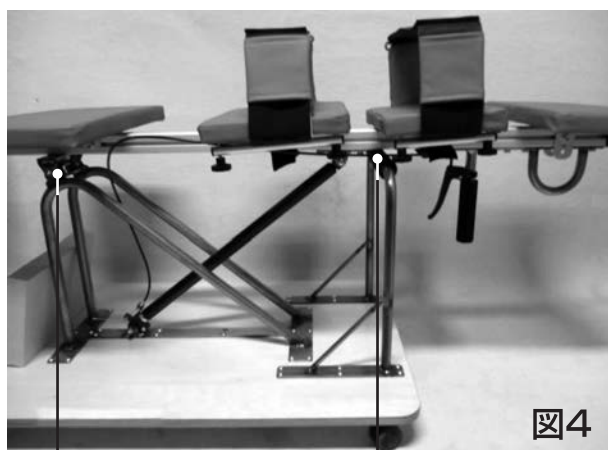

指詰め注意

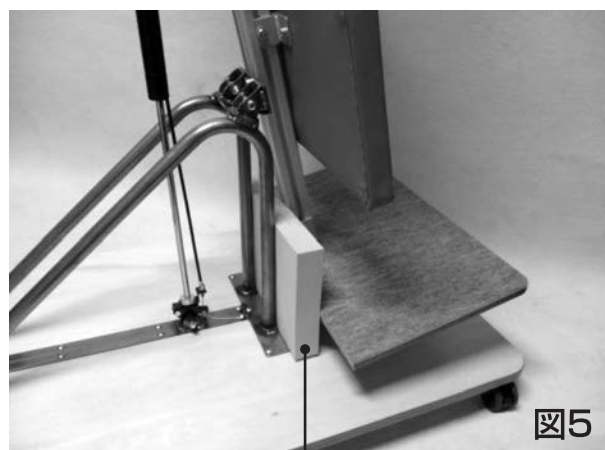

挟み込み注意

※乗り降りの際は、下腿部パッド、腰部パッド以外には腰掛けないでください。

胸部パッドや頭部パッドに腰掛けると台座ごと転倒する恐れがあります。

5.3 各パッドの高さ調整

(1) 各パッドの金属部側面に取り付けられている調整ネジをM8の六角レンチで緩めます(図6)



締める

緩める

図6

(2) 各パッドをポールと平行に動かし、高さの調整を行ないます。

(3) (1)で緩めたネジをしっかりと締めます。締め方がゆるい場合、パッドが動く恐れがあります。

※各調整部位を持ちながら操作を行ってください。不意に落ちたり、指を挟んだりすることがあります。

※側面各部品の高さ調整ネジを緩めすぎないでください。部品が脱落することがあります。

5.4 各パッドの幅調整

(1) 胸部パッド、腰部パッド裏側に取り付けられているノブボルトを緩める。(図7)

(2) プラスティック部を水平方向に調整します。(図8)

(3) (1)で緩めたノブボルトをしっかりと締めます。締め方が緩い場合は、パッドが動く恐れがあります。



図7



図8

※各調整部位を持ちながら操作を行ってください。不意に落ちたり、指を挟んだりすることがあります。

6.使用方法

- 屋内の水平なところに設置してください。
- 万一、転倒した際にけがの原因となるようなものを周囲に置かないでください。
- ご使用に際しては、各種ベルトとパッドについて、お子さまの姿勢安定及び、落下防止の為、必ず装着してください。(チェストサポート、チェストベース、チェストベルト、トランクベース、トランクベルト、ニーベース、ニーサポート)
- 使用中や保管時(移動しない場合)は、必ずキャスターをロックしておいてください(P. 4参照)

7.日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は使用しないでください。

8.廃棄方法

各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

9.保証とアフターサービス

保証期間中は

保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。