

手関節背屈保持装具

ORTOP[®] シグナリスト サポート 取扱説明書


オルトップ

装着者用

この度は、弊社の製品をご購入いただき
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、製品を
正しく安全にお使いください。

お読みになられた後は、保証書とともに
大切に保管し、必要に応じくりかえし
お読みください。

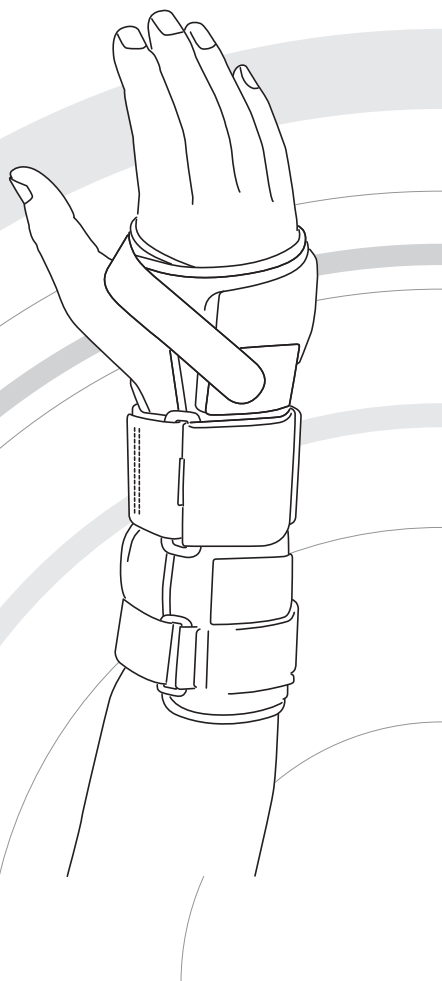

1. 安全にご使用いただくために



警告

誤った使い方をしたときに、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 必ず医師の指示に従って使用してください。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方への転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 装着部に発赤やかぶれ、痛みが生じた場合、直ちに医師の指導を受けてください。
- 不適合が生じた場合や変形、磨耗、異音が生じた場合など、装具の異常は、身体を傷つけることがありますので、異常を発見した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- 装具の機能操作は確実に行ってください。（特に継手部分の固定、解除の際には確実に操作してください。）
- 装着の際は、ベルト等により適切な締め付けを行い、正しい位置を保持してください。



注意

誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 装着や使用の際、継手等の可動部分で体の一部や衣服等を挟んだりして傷つける場合がありますので取り扱いには注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

コルセット・補装具 装用時のカイロ（貼るカイロ等温熱剤）の取扱いについての注意点



カイロ等温熱剤は、直接コルセット・補装具に貼らないようお願いいたします。また、直接素肌にカイロ等を貼り、その上装具を長時間装着する事もさけてください。



金属部分（筋金部分）やプラスチック部分と身体との密着度が高い場所には、特に貼らないようお願いいたします。



カイロ等どうしてもご使用される場合は、上記の事を守り、安全には十分注意をしてご使用ください。

お願い

面ファスナーをしっかり押さえてご使用ください。


不十分な場合、接着力が得られず危険です。

●面ファスナーはしっかり押さえる事で接着されています。

●ご使用の際は、しっかり押さえて（圧力をかけて）ください。



2. 各部名称

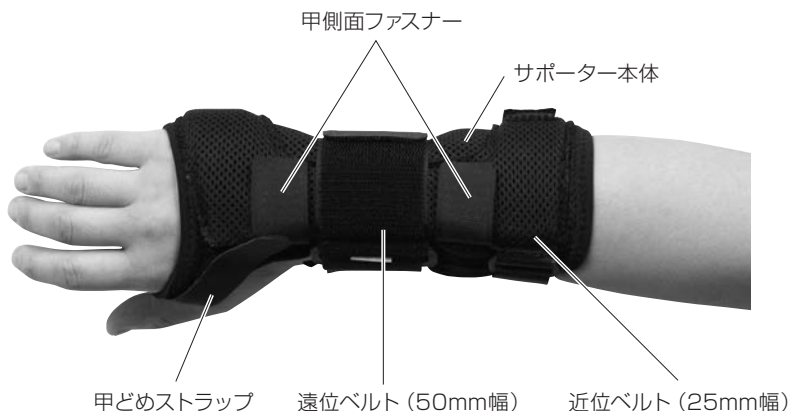

3. 適合サイズ

サイズ	適応範囲 (手首周径)
S	12.5~14.5
M	14.5~16.5
L	16.5~19.0

4. 装着方法

※遠位ベルト (50mm幅) 下のタグにて左右の確認を行ってください。

①

ステーを甲側に
あわせて手を通
してください。



②

遠位ベルト (50mm幅)
をカンに通し、引っ張って
とめます。
その際、ベルトを上から
押しつけてください。



③

甲どめストラップベルトを甲側に引っ張って、とめます。必要に応じてとめる位置や締め具合を調整してください。



④

近位ベルト(25mm幅)をカンに通し、引っ張ってとめます。その際、ベルトを上から押しつけてください。



⑤

サポーターのゆるみやズレがないかベルトを締めすぎていないか確認してください。違和感がある場合は、再度はじめてから装着し直してください。ベルトが長い場合は、カットしてください。

5. 日常のお手入れ方法

汗をかいたり、装具が濡れたときは、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。

マジックベルトの粘着力が低下している場合は、安全のため交換が必要となりますので弊社までご連絡ください。なお、毛玉等が付着した場合は、つまようじなどをマジックベルトの表面に滑らせて取り除いてください。



洗濯は、中性洗剤で水もしくはぬるま湯にて押し洗いし、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。アイロン、乾燥機は使用しないでください。




洗濯の際は、ステアーを抜いてください。

また、抜いたステアーを再度入れ直すときは前後および表裏をご確認ください。

6. ステアの取り出し・取り付けについて


6-1 取り出し方

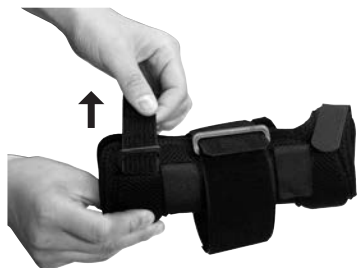

- ① 近位ベルト（25mm幅）・遠位ベルト（50mm幅）をはずしてください。



- ② 甲側面ファスナー（2カ所）をはずしてください。

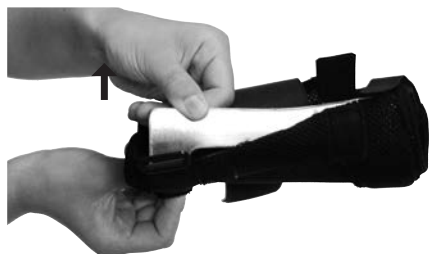

- ③ ステアを近位側から横に引き抜いてください。




- ④ 次にステアを全体に引き抜いてください。

6-2 取り付け方



- ①
ステーを遠位側から本体に
差し込んでください。

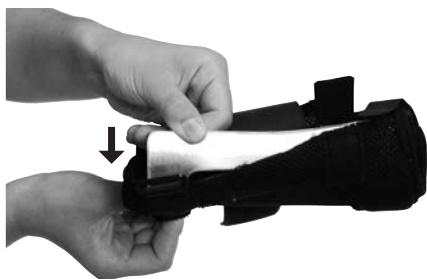

- ②
次に近位側のステーを本体
に差し込んでください。



- ③
甲側面ファスナー（2カ所）・
近位ベルト（25mm幅）・遠
位ベルト（50mm幅）をとめ
てください。

7. 材質

支柱部	アルミ合金
本体	ポリエステル・ポリウレタン
伸縮生地	ナイロン・ポリウレタン
面ファスナー	ナイロン
ふちテープ	ナイロン

8. 廃棄方法

各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

9. 保証とアフターサービス

保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

 **川村義肢株式会社**

大東本社 TEL.072-875-8020 FAX.072-875-8041 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

東京本社 TEL.03-5635-1611 FAX.03-5635-1612 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

本書の著作権は川村義肢株式会社に帰属しており、許可なく本書の全てまたは一部を複製することはお断りいたします。